



хірургічний
атравматичний
шовний матеріал

ГОЛНИТ®

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Полігліколід (ПГА)

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛНИТ», Україна.

Опис

Шовний матеріал ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) виробництва ГОЛНИТ – це плетений з покриттям матеріал, що розсмоктується, виготовлений із 100% полігліколіду (ПГА). Шовний матеріал фіолетового та білого кольору.

Дія

Проведені клінічні випробування ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) показали, що матеріал викликає мінімальну реакцію тканин. Шовний матеріал ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) зберігає 65% своєї початкової міцності за 14 днів після імплантації та 40% міцності за 21 день. Повна абсорбція шляхом гідролізу повністю завершується через 60-90 днів. Шовний матеріал ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) не руйнується під дією тканинних ферментів і його якість не погіршується у випадку інфекції.

Застосування

Загальна хірургія, фасції, лігатури, шкірні, підшкірні шви, гінекологія, гастроентерологія, ортопедія, травматологія, урологія, педіатрія, пластична хірургія, офтальмологія.

Протипоказання

У зв'язку з тим, що даний матеріал є таким, що розсмоктується, він не призначений для використання у тих випадках, де необхідне тривале збереження міцності на розтяг, наприклад, при імплантації серцевих клапанів чи синтетичних імплантатів. Також не призначений для випадків загоювання ран. Цей матеріал протипоказаний для використання у серцево - судинній хірургії.

Попередження

Матеріал розроблений для одноразового використання. Повторно не стерилізувати. Повторна стерилізація матеріалу може призвести до втрати міцності нитки.

Заходи безпеки

Як і в роботі з іншими матеріалами, треба уникати пошкоджень під час експлуатації. Уникайте стискання матеріалу чи контакту з гострими інструментами. Для безпеки (надійності) вузла, використовується стандартна хірургічна техніка в'язання, як це передбачено хірургічними умовами, та ґрунтуючись на досвіді хірурга. При зав'язуванні вузла, кінці ниток натягуються в протилежних напрямках з однаковою силою.

УВАГА: натяг не повинен проводитись голкою, затягуйте нитку, використовуючи пальці. Потрібно уникати ривків, які можуть пошкодити нитку чи відділити нитку від голки. Для створення надійного вузла, необхідно затягнути нитку у відповідності до техніки в'язання стандартних хірургічних вузлів.

Стерильність















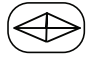
Шовний матеріал ПОЛІГЛІКОЛІД (ПГА) виробництва ГОЛНИТ випускається в подвійній стерильній упаковці. Не використовувати матеріал, якщо упаковка має пошкодження. В запечатаному вигляді продукт залишається стерильним протягом терміну придатності, вказаному на упаковці.

Побічна дія

Не виявлена.

Правила зберігання

Шовний матеріал (ПГА) повинен зберігатися при температурі від 5°C до 40°C та вологості не більше 80%, в повітрі не повинно міститися ніяких агресивних домішок

	Use By	Використати до
	Manufacture Date	Дата виготовлення
	Do Not Reuse	Не використовувати повторно
	Sterilized with ethylene oxide	Стерилізовано окисом етилену
	Temperature limitation	Температура зберігання
	Caution	Обережно
	Batch Code	Лот продукції
	Product Code	Код продукції
	Manufacturer	Виробник
	Reverse Cutting Needle	Зворотньо-ріжуча голка
	Cutting Needle	Ріжуча голка
	Spatula Needle	Шпательна голка
	Taper Point Needle	Колюча голка
	Tapercut Needle	Колюче-ріжуча голка
	Tapercut needle with a sharpening "diamond"	Колюче-ріжуча голка з заточкою «даймонд»



ТОВ «Голнит»

Харківське шосе, 48, 02160, м. Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 296-19-82

+38 (044) 296-11-96

E-mail: info@golnit.com

www.golnit.ua



хірургічний
атравматичний
шовний матеріал

ГОЛНИТ®

Вироблено в Україні.